
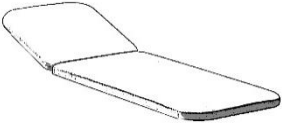


## Recommandations pour le nettoyage des tables d'examen, de thérapie et de massage S de Novak M

	MATÉRIAUX	NETTOYAGE	DÉSINFECTION
<b>CONSTRUCTION</b>  	Acier revêtu de poudre, acier chromé, acier inoxydable	Un nettoyage régulier est recommandé. Utilisez un chiffon doux en microfibre avec un mélange d'eau et de savon, puis essuyez. Utilisez des nettoyeurs non abrasifs !	Pour la désinfection, suivez les mêmes instructions que pour le rembourrage.
	Revêtement en plastique	Retirez la poussière et les saletés sèches à l'aide d'un chiffon doux et humide.  Utilisez des nettoyeurs ménagers traditionnels non abrasifs. Rincez soigneusement et essuyez à l'aide d'un chiffon sec.  N'utilisez pas d'acétone, de produits de nettoyage chimiques, de solvants et de produits de nettoyage appartenant à la famille des cétones, des esters et des solvants aromatiques.	
<b>REMBOURRAGE</b>  	Rembourrage : cuir synthétique	Un nettoyage régulier est recommandé.  Utilisez de l'eau chaude et un chiffon en microfibre ou une éponge. En cas de taches, utilisez un mélange de savon et d'eau chaude. Enlevez les résidus de savon avec un chiffon humide, puis essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher complètement.  Les taches de sang doivent être retirées immédiatement à l'eau froide.  Les résidus d'huile de massage et de lotion doivent être éliminés immédiatement avec un mélange d'eau et de savon.  N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de solvants, d'acétone ou d'acides. N'utilisez pas de substances contenant de l'huile ou de la graisse pour l'entretien du cuir.	Nettoyez et séchez toujours le rembourrage avant de le désinfecter !  Vous trouverez ci-joint une liste des désinfectants recommandés.  Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.  Utilisez seulement un désinfectant à la fois !

## Recommandations pour le nettoyage des tables d'examen, de thérapie et de massage S de Novak M

Groupe principal d'ingrédients actifs	Désinfectant
Composés d'ammonium quaternaire et amines	Lingettes Cleanisept AF Incidin Extra Incidin Pro Kohrosolin FF Lysoformine Plus Microbac forte Lingettes Mikrozyd universal Lingettes Mikrozyd sensitive Lingettes Mikrozyd AF Terralin protect
Composés partiels	Descogen Dismozon Perform
Formaldéhyde et/ou autres dérivés aldéhydes respectifs	Incidin Plus Incidin Kohrsolin Optisept
Alcool	Bacillol AF Bacillol Plus Mousse Bacillol 30 Lingettes Bacillol 30 Incidine liquide Mousse Meliseptol foam fresh Mousse Meliseptol foam pure

### Clause de non-responsabilité

Veillez toujours respecter le mode d'emploi du produit désinfectant utilisé. Un usage répété sur le long terme ne peut exclure la possibilité de détérioration du matériel. Novak M décline toute responsabilité quant à l'effet désinfectant des agents cités ci-dessus.

Komenda, avril 2023