
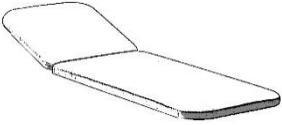


Priporočila za čiščenje Novak M preglednih, masažnih in terapevtskih miz S

	MATERIALI	ČIŠČENJE	RAZKUŽEVANJE
KONSTRUKCIJA 	Prašno barvano jeklo kromirano jeklo, nerjaveče jeklo	Priporočamo redno čiščenje. Uporabite mehko krpo iz mikrovlaknen ter mešanico vode in mila. Obrišite do suhega. Uporabljajte neabrazivna čistilna sredstva!	Za dezinfekcijo upoštevajte enaka navodila kot pri oblazinjenju.
	Pokrov iz plastike	Prah in suho umazanijo odstranite z mehko in vlažno krpo. Uporabljajte običajna gospodinjska čistila, ki so ne abrazivna. Po končanem čiščenju dobro operite in očistite s suho krpo. Ne uporabljajte acetona, kemičnih čistil, topil in čistil, ki so kemične skupine ketonov, estrov in aromatskih topil.	
OBLAZINJENJE 	Oblazinjenje: umetno usnje	Priporočljivo je redno čiščenje. Uporabite toplo vodo in krpo iz mikrovlaknen ali gobo. V primeru madežev uporabite mešanico mila in tople vode. Ostanke mila odstranite z vlažno krpo, obrišite s suho krpo in pustite, da se popolnoma posuši. Madeže krvi je treba takoj odstraniti s hladno vodo. Ostanke masažnega olja in krem je potrebno odstraniti takoj z mešanico vode in mila. Ne uporabljajte abrazivnih čistil, topil, acetona ali kislin. Za vzdrževanje ne uporabljajte posebnih sredstev za čiščenje usnja, ki vsebujejo olja ali mast.	Pred razkuževanjem vedno očistite in posušite oblazinjenje! Seznam priporočenih sredstev za razkuževanje najdete v prilogi. Vedno upoštevajte navodila na embalaži razkužilnih sredstev. Naenkrat uporabite samo eno vrsto razkužila!

Priporočila za čiščenje Novak M preglednih, masažnih in terapevtskih miz S

Glavne skupine aktivnih sestavin	Razkužilo
Amonijeve spojine in amini	Cleanisept AF wipes Incidin Extra Incidin Pro Kohrosolin FF Lysoformin Plus Microbac forte Mikrozid universal wipes Mikrozid sensitive wipes Mikrozid AF wipes Terralin protect
Per-spojine	Descogen Dismozon Perform
Formaldehid in/ali drugi aldehidi oziroma derivati	Incidin Plus Incidin Kohrsolin Optisept
Alkohol	Bacillol AF Bacillol Plus Bacillol 30 foam Bacillol 30 tissues Incidin liquid Meliseptol foam fresh Meliseptol foam pure

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vedno upoštevajte navodila za uporabo posameznega razkužila. Pri dolgotrajni uporabi ni mogoče izključiti možnosti poslabšanja kakovosti materiala. Družba Novak M ne prevzema nobene odgovornosti za razkuževalni učinek zgoraj navedenih sredstev.

Komenda, April 2023